
体位変換器

抜群のフィット感と復元性で、いつも快適なポジショニングができる体位変換器です。

ナーセント。Ex ロール ナーセント。Ex ワイド

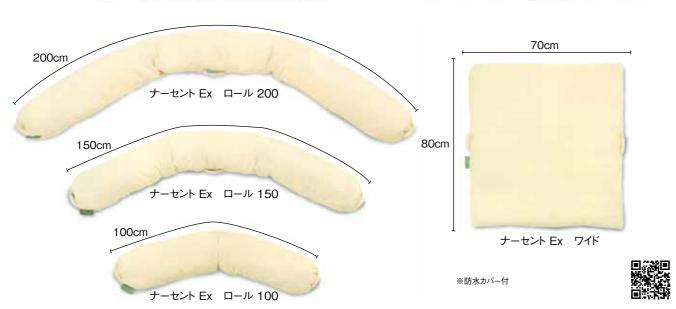

ーセント Ex ロール200

商品番号 F-371B

TAISJ-F:00149-000034 ●型式:ナーセント Ex ロール200

月極レンタル料金				
2,000				
1割負担 2割負担 3割負担				
200	400	600		

ナーセント Ex ロール150 アイ・ソネックス

商品番号 F-371C

TAISJ-F:00149-000035 ●型式:ナーセント Ex ロール150

月極レンタル料金				
1,800				
1割負担 2割負担 3割負担				
180 360 540				

ナーセント Ex ロール100 アイ・ソネックス

商品番号 F-371D

TAISコード:00149-000036 ●型式:ナーセント Ex ロール100

月極レンタル料金				
1,500				
1割負担 2割負担 3割負担				
150	300	450		

ナーセント Ex ワイド アイ・ソネックス

商品番号 F-371E

TAISコード:00149-000037 ●型式:ナーセント Ex ワイド

月極レンタル料金					
	2,000				
	2,000				
1割負担	2割負担	3割負担			

400

600

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

200



体位変換方法

ナーセントEx ロール200 の体位変換例




ナーセント.Ex ロール 100 と**ワイド** の体位変換例



ナ-セント。Ex ロ-ル 150 と**ワイド** の体付変換例



ポジショニング場面

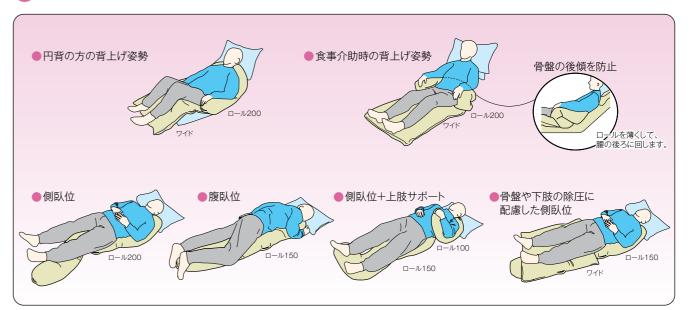

- (1) ベッド上での体位変換や良肢位保持を目的にご使用ください。体位変換後は必ず、背抜きや足抜きを行い、背中や下肢に生じた ずれ力を解消してください。
- (2) もとの姿勢に戻す場合は、身体の下に差し込んだナーセントExを抜き取ってください。この際も、ずれ力を解消するために必ず 背抜きや足抜きを行ってください。
- (3) 体位変換を行うときは、ナーセントExを敷き込む位置や深さを調整しながら、骨突出部などの接触圧を手などで確認し、圧迫が 軽減されていることをご確認ください。

・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。 ・体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。 ·家庭用洗濯機で丸洗いOK!



セロリAタイプ モルテン

体位変換器+高耐久・マルチ・体圧分散式クッション。

TAISコード 00054-000112 商品番号 F-372A

●型式:MTYA ●タイプ:まくら型 ●サイズ(cm):全長68×全幅32

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,000	100	200	300

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

セロリAタイプを使った上半身を 主とした体位変換方法



Aタイプを頭~肩の下に入れておきま す。体の向きを変えやすくするために、 膝を立てて腕をお腹の上にのせます。



Aタイプの両側にある体位変換用の 持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして上半 身の向きを変えます。立てた膝に手を添え ると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向 き)にして体位変換完了です。

Aタイプを使った その他の体位変換方法



下半身の向きを変える

質 量



おしりの向きを変える



モルテン

背中の向きを変える

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に
- 体位変換ができます。
- ・体位変換した姿勢を
- そのまま保持することもできます。
- ·家庭用洗濯機で丸洗いOK!

セロリBタイプ

体位変換器+高耐久・マルチ・体圧分散式クッション。

TAIS⊐-F 00054-000113

商品番号 F-372B

●型式:MTYB ●タイプ:スネーク型 ●サイズ(cm):全長141×全幅23



セロリBタイプを使った下半身を 主とした体位変換方法



※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。



Bタイプを2つ折りにしてひざの下に入 れておきます。体の向きを変えやすくす るために、腕をお腹の上にのせます。



Bタイプの両側にある体位変換用の 持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして 下半身の向きを変えます。肩に手を添え ると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向 き)にして体位変換完了です。

Bタイプを使った その他の体位変換方法



体全体の向きを変える



ナーセントパットA

アイ・ソネックス

身体の下に差し込むだけで容易に体位変換ができ、 そのまま良肢位を保持します。



体位変換器 ペンギンサポート パラマウントベッド

ベッド上でサイドレールなどに固定すると、側臥位の一時的な保持が できるので「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。



質 量



月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,500	150	300	450
※地垣	載によって対象となら	ない場合がありますの	ので、ご確認下さい。



- ●サイズ(cm):全長約163×全幅約48
- ●最大使用者体重(kg):138

●型式:ナーセントパットA

●組合せ:大ピース×1、小ピース×2 ●サイズ(cm):(大)幅40×長さ40×

高さ10、(小)幅20×長さ40×高さ10

ノルディックスライド(ミディ)

パシフィックサプライ


内側が滑りやすくなっている筒状のスライディングシート。 力をかけずに、移動、乗り移りができます。

I AIS J - N	00222-000119		商品番号	F-366
● 刑=ť· / II.=	デックフライド(ミディ)	● #./ ¬	"(cm)·全里Q(7×今恒72

ベッド上での 体位変換が 容易に行えます。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,500	150	300	450

使い方の参考例 ★ベッド上のズレを元に戻す方法

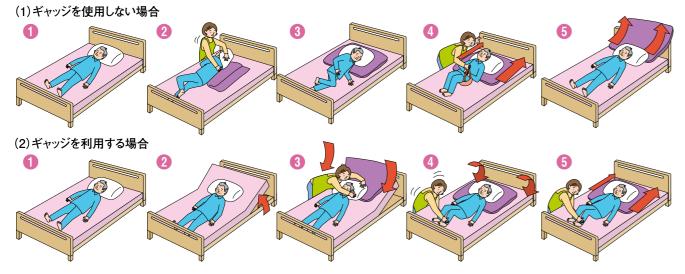

ライトターンC(コンパクトタイプ)

アイ・ソネックス

テコの原理で簡単に体位変換。 スウィング機能はリハビリに利用できます。

TAIS⊐-F 00149-000017

商品番号 F-367A

●型式:ライトターンC ●サイズ(cm):巾40×高39×奥行13

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,500	150	300	450

使用方法



ライトターンの中央隔壁を足 に乗せます。



先のほうに向けて倒し、凹部 し、両膝を両側の凹部に入れ って回転させ、肩も少し押しな ます。



ライトターンを回転させて起こ まずライトターンのベルトを持 がら寝返りを行います。




股間を開いた状態を保持でき ますので、おむつ交換や摘便 が容易に行えます。

USAKO シリーズ

安全・安心な摂食嚥下をサポート

ユークッション(体位変換器)

上肢サポートクッション。肩と腕をしっかり支えます。

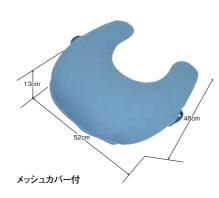

USAKOシリーズ ユークッション

TAISコード 00149-000040 商品番号 F-371F

●型式:ユークッション Mサイズ

1,800				
1割負担 2割負担 3割負担				
180 360 540				

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

メッシュカバー付

USAKOシリーズ ユークッション


TAISコード 00149-000041 商品番号 F-371G ●型式:ユークッション Lサイズ

月極レンタル料金			
2,000			
1割負担 2割負担 3割負担			
200	400	600	

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

●ベッド上で

クビマクラ(車いす付属品) 頭や首を適切に保持できない方に。

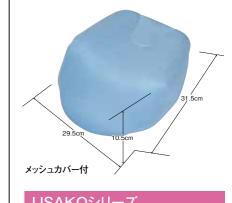

クビマクラ		アイ・ソネックス		
	TAIS⊐-ド	00149-000044	商品番号	B-461G

●型式:クビマクラ

月極レンタル料金		
2,000		
1割負担	2割負担	3割負担
200	400	600

※この商品は車イス付属品になります。

車いす・ベッドでの使用例

●車いすで ●円背の方に(車いす)







●円背の方に(ベッド)



