

# 床ずれ防止用具

## 床ずれとは

非常に治りにくい皮膚の潰瘍で、発熱の原因になったりすることもあります。

### 1 床ずれはどうしてできるのか？

- ① いつも下になっている部分の皮膚が圧迫されるので血行が悪くなる
- ② 皮膚が不潔になったり、湿ったり、摩擦が起きたりする
- ③ 全身の栄養状態が悪くなる


何より大切なことは、**床ずれをつくらないことです！**

### 2 床ずれのできやすい場所

● 仰向けに寝ている場合



● 横向けに寝ている場合

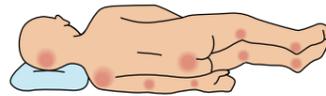

● 体圧のかかりやすい、骨の突き出た所に注意してください。(例) 仙骨部、足、足関節部、大転子部、等

## 床ずれ防止の三原則

原因となる要素を取り除く必要があります。

### 1 体位交換をして、同じ部位の圧迫をさける

● 仰向け、右向き、左向き、……と、2時間毎に体位を変える



● できるだけ座る姿勢をとる



### 2 清潔を保ち、刺激をさける

- ① 入浴や清拭で皮膚を清潔にし、こまめにおむつ交換をして、むれを少なくする
- ② 寝まき、シーツはノリづけせず、よく乾いたものをシワのないように
- ③ 寝まき、シーツ、ふとんはよく日光に干す
- ④ 寝床にゴミや食べかすなどがあれば取り除く



※すべての人が防止できるわけではありませんが、適切な対応をとりましょう。

### 3 全身の栄養状態を良くする

食べやすく工夫した、バランスの良い食事内容にする。特に、たん白質やビタミンCを十分に摂るようにしましょう。




## 床ずれ防止用具の種類

ご利用者さまの身体状況に応じて、適切な床ずれ防止用具を選びましょう。


### エアーマットタイプ

ポンプから出るエア（空気）によって、複数のエアセルを膨張・収納させて、体を支える面を変化させます。

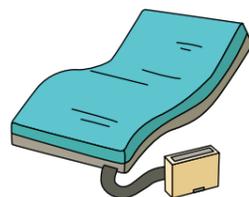

### 静止型マットレスタイプ

ウレタンフォーム、ジェル等の素材により、広い面で体を支えることにより、体圧を分散させます。

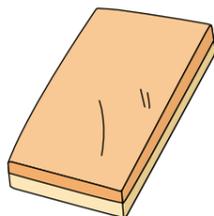

## マットレスの種類と選び方

床ずれ発生リスク度の判定方法 (OHスケール)

評価法	判定基準	リスク度	点数
自立体位変換	完全に「できる」、完全に「できない」以外は「どちらでもない」	できる	0点
		どちらでもない	1.5点
		できない	3点
病的骨突出(仙骨部)	中央から8cm離れたところの高低差によって評価	なし	0点
		軽度・中重度	1.5点
		高度	3点
浮腫(むくみ)	指で5秒間押し、指を離してもへこみが消えなければ浮腫あり	なし	0点
		あり	3点
関節拘縮	関節拘縮のあるなしで評価	なし	0点
		あり	1点

## 床ずれ発生リスク度の判定結果(合計点数)

マットレスの種類	リスク無し(0点)	軽度(1~3点)	中等度(4~6点)	高度(7~10点)
静止型マットレス		キュオラ	p35	
		アルファブラF	p36	
		ディンプルマットレス	p36	
		アクアフロート	p35	
		ストレッチグライド	p36	
		エバークラウド	p37	
		ピュアレックス	p37	
		ナッソー	p36	
エアーマットレス		フィール	p32	
		ネクサスR	p34	
		ここちあ結起3D	p33	
		ステージア	p32	
		ラグーナ	p33	
		インフィニティ	p34	
		オスカー	p32	

### ココチあ 結起 3D

パラマウントベッド

「体圧分散」と「ずれ軽減」で床ずれリスクを軽減する、全く新しいベッド運動型エアマットレス。



cococha ゆうき **結起** 3Dタイプ PARAMOUNT BED

フルカラー液晶操作パネル

対MRSA 抗菌加工 難燃加工

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400

### フィール

モルテン

ご利用者さまそれぞれに適した体圧分散性能と優しい触感の寝心地を提供する高機能静止型マットレス。

◆常に安定した体圧分散性能  
エアセル層が、ご利用者さまそれぞれの体重や体型に合わせて最適な圧に自動調整します。体重が軽くても重くても一定の体圧分散性能を確保することができます。

◆優しい触感と寝心地のよさ  
平らで柔らかい繊維層は、布団のような優しい触感で寝心地を高めており、腰痛やリウマチなどで痛みに敏感な人にも安心してお使いいただけます。ふわふわ感がなく寝返りもしやすくなっています。



◆ベッドリンク機能  
ベッドの背あげ操作に連動してマットレスの圧切替や背ぬき、姿勢保持などをおこなうためエアの圧力をフルオートで制御し、背あげの際の床ずれリスクを軽減します。楽匠Sベッド及び楽匠Zベッドとのリンクが可能です。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

### オスカー

モルテン

さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する、人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる8つの特性を備えています。

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策
- 体位変換

従来のエアセル(球面) vs 新形状のマイクロエアセル(フラット)

4つのポジショニングセルで、人の手に近いやさしい自動体位変換を行います。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

### ステージア

モルテン

体圧分散式マットレスに求められる基本特性(体圧分散性能、除圧性能、寝心地のよさ)を向上し、エアマットレスの弱点(端座位の安定感と立ちあがりやすさ、むれ&ひえ)を対策した、床ずれケアのための高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる6つの特性を備えています。

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策

かんたん設定 マットレスのやわらかさを自動調整

4段階でやさしい寝心地を、全てのベッドに適用

安全確保 30°を超えるヒールズを自動で感知し、自動でフラットに戻す

底づき防止 エアセルが体重をしっかり支え、底づきのリスクを防止します。


月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

### スモールチェンジ ラグーナ

ケーブ

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す、「スモールチェンジ機能」搭載。快適な眠りを実現し、介護者の負担を軽減します。

自動で小さな体位変換を15分毎に行います。

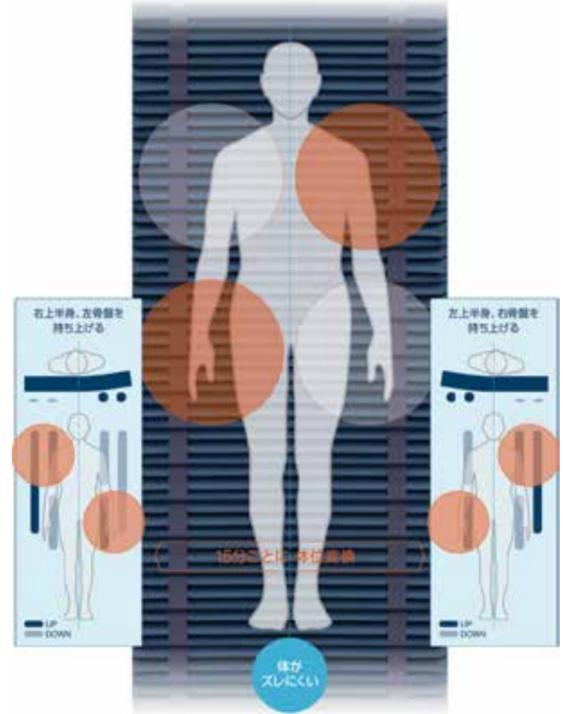

右上半身、左臀部を持ち上げる / 左上半身、右臀部を持ち上げる

15分ごと体位変換

体がスレにくい

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

### フィール

モルテン

ご利用者さまそれぞれに適した体圧分散性能と優しい触感の寝心地を提供する高機能静止型マットレス。

◆常に安定した体圧分散性能  
エアセル層が、ご利用者さまそれぞれの体重や体型に合わせて最適な圧に自動調整します。体重が軽くても重くても一定の体圧分散性能を確保することができます。

◆優しい触感と寝心地のよさ  
平らで柔らかい繊維層は、布団のような優しい触感で寝心地を高めており、腰痛やリウマチなどで痛みに敏感な人にも安心してお使いいただけます。ふわふわ感がなく寝返りもしやすくなっています。



◆ベッドリンク機能  
ベッドの背あげ操作に連動してマットレスの圧切替や背ぬき、姿勢保持などをおこなうためエアの圧力をフルオートで制御し、背あげの際の床ずれリスクを軽減します。楽匠Sベッド及び楽匠Zベッドとのリンクが可能です。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

### オスカー

モルテン

さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する、人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる8つの特性を備えています。

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策
- 体位変換

従来のエアセル(球面) vs 新形状のマイクロエアセル(フラット)

4つのポジショニングセルで、人の手に近いやさしい自動体位変換を行います。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

### ステージア

モルテン

体圧分散式マットレスに求められる基本特性(体圧分散性能、除圧性能、寝心地のよさ)を向上し、エアマットレスの弱点(端座位の安定感と立ちあがりやすさ、むれ&ひえ)を対策した、床ずれケアのための高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる6つの特性を備えています。

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策

かんたん設定 マットレスのやわらかさを自動調整

4段階でやさしい寝心地を、全てのベッドに適用

安全確保 30°を超えるヒールズを自動で感知し、自動でフラットに戻す

底づき防止 エアセルが体重をしっかり支え、底づきのリスクを防止します。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800



圧切替型 / 高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

## エアマスター ネクサスR ケーブ

ワンタッチで誰でも簡単に安全に使用出来る高機能エアマットレス。



- かんたんモード搭載で40kg~60kgの療養者は電源コンセントを入れるだけ。
- 体重設定は20kg~120kgに対応。



マットレス内圧と動きを最適な状態に自動調整します。

- |  |  |
|--|--|
| <p>レギュラー (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×幅90×厚12<br/><b>商品番号 E-394D</b><br/>TAISコード:00206-000083<br/>●型式:CR-663</p> | <p>レギュラー (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×幅84×厚12<br/><b>商品番号 E-394E</b><br/>TAISコード:00206-000082<br/>●型式:CR-660</p> |
| <p>ミニ (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×幅90×厚12<br/><b>商品番号 E-394F</b><br/>TAISコード:00206-000085<br/>●型式:CR-667</p>    | <p>ミニ (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×幅84×厚12<br/><b>商品番号 E-394G</b><br/>TAISコード:00206-000084<br/>●型式:CR-665</p>    |

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100



- レギュラー (91cm幅)  
●サイズ(cm):195×91×1.5  
**商品番号 E-401A**  
TAISコード:01149-000012  
●型式:BRPS-910R


## ブレイラプラス ボディドクターメディカルケア

マットレスの上にひくだけで床ずれ予防効果を得られる通気性のよい夏は涼しく、冬は暖かいベッドパッドです。


### 体圧分散比較データ

テスト状況 使用:5分後 試験者:男性 177cm 70kg (検査協力 タカノ株式会社)

#### ウレタンマットの場合

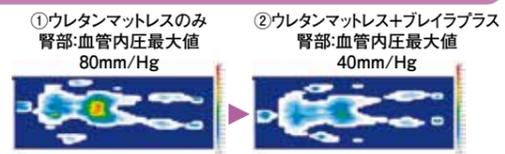

#### エアマットの場合

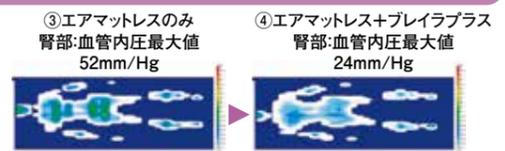

一般的なマットレスをご使用されている方でも、ブレイラプラス・ベッドパッドをご使用頂くだけで、床ずれ防止効果を得られます。さらに、通気性も付加されますので、床ずれ等の患部の乾燥を促す効果もあります。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,500	150	300	450

## ビッグセルインフィニティ ケーブ

頭側挙上時の自動対応、停電対策機能を備えたリスクの高い療養者に対応する高機能エアマットレス。

TAISコード 00206-000126

- レギュラー (100cm幅)  
●サイズ(cm):全長191×幅100×厚17  
**商品番号 E-400E**  
●型式:CR-559

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
10,000	1,000	2,000	3,000



圧切替型 / 高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

TAISコード 00206-000074

- |   |   |
|---|---|
| <p>レギュラー (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×幅90×厚17<br/><b>商品番号 E-400A</b><br/>●型式:CR-555</p> | <p>レギュラー (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×幅84×厚17<br/><b>商品番号 E-400B</b><br/>●型式:CR-550</p> |
| <p>ミニ (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×幅90×厚17<br/><b>商品番号 E-400C</b><br/>●型式:CR-557</p>    | <p>ミニ (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×幅84×厚17<br/><b>商品番号 E-400D</b><br/>●型式:CR-553</p>    |

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700



- |   |   |
|---|---|
| <p>レギュラー (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅90×厚10<br/><b>商品番号 E-383D</b><br/>TAISコード:00206-000077<br/>●型式:CR-591</p> | <p>レギュラー (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚10<br/><b>商品番号 E-383E</b><br/>TAISコード:00206-000077<br/>●型式:CR-590</p> |
|---|---|

## キューオラ (通気タイプ) ケーブ

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性、ご利用者さまのQOLを高めるウレタンフォームマットレスです。

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

Ag+  
銀抗菌

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500



- |  |  |
|--|--|
| <p>レギュラー (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚12<br/><b>商品番号 E-373A</b><br/>TAISコード:00170-000507<br/>●型式:KE-841Q</p> | <p>レギュラー (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚12<br/><b>商品番号 E-373B</b><br/>TAISコード:00170-000508<br/>●型式:KE-843Q</p> |
| <p>ミニ (91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×全幅91×厚12<br/><b>商品番号 E-373C</b><br/>TAISコード:00170-000511<br/>●型式:KE-8411Q</p>   | <p>ミニ (83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚12<br/><b>商品番号 E-373D</b><br/>TAISコード:00170-000512<br/>●型式:KE-8431Q</p>   |

## アクアフロート (通気タイプ) パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のバックが、床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます。背上げた時に、特に高い効果を発揮します。

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

難燃加工 抗菌・防カビ

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位交換器  
手すり  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
歩行器  
歩行補助杖  
徘徊感知機器  
認知症老人  
移動用リフト  
自動排泄処理装置

ストレッチシステムにウレタンフォームを2層プラス。  
最高クラスの体圧分散性能を発揮します。



- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>レギュラー(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長191×全幅91×厚12.5<br/><b>商品番号 E-373F</b><br/>TAISコード:00170-000725<br/>●型式:KE-791TQ</p> | <p>レギュラー(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長191×全幅83×厚12.5<br/><b>商品番号 E-373G</b><br/>TAISコード:00170-000727<br/>●型式:KE-793TQ</p> | <p>ミニ(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長180×全幅91×厚12.5<br/><b>商品番号 E-373H</b><br/>TAISコード:00170-000726<br/>●型式:KE-792TQ</p> | <p>ミニ(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長180×全幅83×厚12.5<br/><b>商品番号 E-373I</b><br/>TAISコード:00170-000728<br/>●型式:KE-794TQ</p> |
|---|---|--|--|

### ストレッチグライドマットレス(通気タイプ) ハラマウントベッド

レギュラー(100cm幅) ●サイズ(cm):全長191×全幅99×厚12.5 <b>商品番号 E-373E</b> TAISコード:00170-000729 ●型式:KE-797TQ			
月極レンタル料金			
<b>5,500</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
550	1,100	1,650	

レギュラー(91cm幅) ●サイズ(cm): 全長191×全幅91×厚12.5 <b>商品番号 E-373J</b> TAISコード:00170-000725 ●型式:KE-791TQ			
月極レンタル料金			
<b>5,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
500	1,000	1,500	

新開発のウレタンフォームと4×4スリット加工で  
身体に気持ちよく沿うマットです。



- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>レギュラー(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長195×幅91×厚13<br/><b>商品番号 E-377A</b><br/>TAISコード:00563-000067<br/>●型式:MB-FA1R</p> | <p>レギュラー(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長195×幅83×厚13<br/><b>商品番号 E-377B</b><br/>TAISコード:00563-000064<br/>●型式:MB-FA3R</p> | <p>ミニ(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長181×幅91×厚13<br/><b>商品番号 E-377C</b><br/>TAISコード:00563-000066<br/>●型式:MB-FA1S</p> | <p>ミニ(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):<br/>全長181×幅83×厚13<br/><b>商品番号 E-377D</b><br/>TAISコード:00563-000063<br/>●型式:MB-FA3S</p> |
|---|---|--|--|

### アルファプロF(通気タイプ) タイカ

レギュラー(100cm幅) ●サイズ(cm):全長195×幅100×厚13 <b>商品番号 E-377E</b> TAISコード:00563-000069 ●型式:MB-FA0R			
月極レンタル料金			
<b>7,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
700	1,400	2,100	

レギュラー(91cm幅) ●サイズ(cm): 全長195×幅91×厚13 <b>商品番号 E-377A</b> TAISコード:00563-000067 ●型式:MB-FA1R			
月極レンタル料金			
<b>6,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
600	1,200	1,800	



- ミニ(91cm幅)  
●サイズ(cm):全長180×全幅90×厚12  
**商品番号 E-376C**  
TAISコード:00206-000070  
●型式:CR-543
- レギュラー(83cm幅)  
●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚12  
**商品番号 E-376B**  
TAISコード:00206-000070  
●型式:CR-540
- レギュラー(91cm幅)  
●サイズ(cm):全長191×全幅90×厚12  
**商品番号 E-376A**  
TAISコード:00206-000070  
●型式:CR-541
- ミニ(83cm幅)  
●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚12  
**商品番号 E-376D**  
TAISコード:00206-000070  
●型式:CR-542

### ディンプルマットレス(防水タイプ) ケーブ

内部にディンプル形状(くぼみ)の空間を持たせ、  
ウレタンフォーム特有の反力を軽減し、  
優れた体圧分散性と快適な寝心地を両立させた  
マットレスです。

褥瘡ステージ なし 第1期 第2期 第3期 第4期			
Ag+ 銀抗菌 防炎加工			
月極レンタル料金			
<b>4,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
400	800	1,200	



- レギュラー(91cm幅)  
●サイズ(cm):  
全長196(内部186)×全幅91×厚13  
**商品番号 E-374A**  
TAISコード:00054-000091  
●型式:MNS91
- レギュラー(83cm幅)  
●サイズ(cm):  
全長196(内部186)×全幅83×厚13  
**商品番号 E-374B**  
TAISコード:00054-000091  
●型式:MNS83

### ナツノ(防水タイプ) モルテン

3層式高密度ウレタンフォームにより、  
優れた体圧分散性能と端座位時の安定感を両立。  
更に、3層式スライド構造によりベッド背上げ時の  
背中にかかる苦しさを低減し、楽な姿勢を確保。

褥瘡ステージ なし 第1期 第2期 第3期 第4期			
月極レンタル料金			
<b>5,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
500	1,000	1,500	

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。



- |   |  |
|---|--|
| <p>通気タイプレギュラー(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚13<br/><b>商品番号 E-402A</b><br/>TAISコード:00170-000962<br/>●型式:KE-621TQ</p> | <p>ドライタイプレギュラー(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚13<br/><b>商品番号 E-403A</b><br/>TAISコード:00170-000966<br/>●型式:KE-621UQ</p> |
| <p>通気タイプレギュラー(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚13<br/><b>商品番号 E-402C</b><br/>TAISコード:00170-000964<br/>●型式:KE-623TQ</p> | <p>ドライタイプレギュラー(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚13<br/><b>商品番号 E-403C</b><br/>TAISコード:00170-000968<br/>●型式:KE-623UQ</p> |
| <p>通気タイプミニ(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×全幅91×厚13<br/><b>商品番号 E-402B</b><br/>TAISコード:00170-000963<br/>●型式:KE-622TQ</p>    | <p>ドライタイプミニ(91cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×全幅91×厚13<br/><b>商品番号 E-403B</b><br/>TAISコード:00170-000967<br/>●型式:KE-622UQ</p>    |
| <p>通気タイプミニ(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚13<br/><b>商品番号 E-402D</b><br/>TAISコード:00170-000965<br/>●型式:KE-624TQ</p>    | <p>ドライタイプミニ(83cm幅)<br/>●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚13<br/><b>商品番号 E-403D</b><br/>TAISコード:00170-000969<br/>●型式:KE-624UQ</p>    |

### エバープロウド ハラマウントベッド

エクストラソフト面とソフト面のリバーシブルで  
「体圧分散・ずれ軽減・蒸れ軽減」の3つの機能で  
床ずれ防止をサポート。  
少しでも寝返りが出来る人にオススメ。

褥瘡ステージ なし 第1期 第2期 第3期 第4期			
月極レンタル料金			
<b>6,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
600	1,200	1,800	



- レギュラー(91cm幅)  
●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚14  
**商品番号 E-399A**  
TAISコード:00054-000037  
●型式:MPX1591

### ピュアレックス モルテン

床ずれ防止の圧対策と快適な寝心地を実現した  
静止型マットレス。

優れた体圧分散性能とずれ対策

身体の動きにフィットして圧を対策する圧感調整素材  
フィッシュスケールに優れた「高弾力性」のウレタンフォームと「特殊なスリット加工」のウレタンフォームを組み合わせることで、  
肩突出部など局所にかかる圧を軽減します。

【対策】かかとへの圧を軽減  
「高弾力性」のウレタンフォームと「特殊なスリット加工」のウレタンフォームを組み合わせることで、かかとへの圧を軽減します。

【対策】股関節への圧を軽減  
「高弾力性」のウレタンフォームと「特殊なスリット加工」のウレタンフォームを組み合わせることで、股関節への圧を軽減します。

【対策】ベッド背上げ時の背中への圧を軽減  
「高弾力性」のウレタンフォームと「特殊なスリット加工」のウレタンフォームを組み合わせることで、ベッド背上げ時の背中への圧を軽減します。

月極レンタル料金			
<b>5,000</b>			
1割負担	2割負担	3割負担	
500	1,000	1,500	

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位交換器  
手すり  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
歩行器  
歩行補助杖  
徘徊感知機器  
認知症老人  
移動用リフト  
自動排泄処理装置